



## Logopedický kufrik ARK – sada špachtlí ARK s logopedickým vibrátorem Z-vibe

### V súprave:

1. Logopedický VIBRÁTOR Z-vibe (DnZ-vibe)
2. Špachtľa PROBE
3. Špachtľa MINI
4. Špachtľa PREEFER
5. Špachtľa FINE
6. Špachtľa POPETKA
7. Špachtľa LYŽIČKA
8. Hryzacie špachtle (2 ks)
9. Hubkové špachtle (3 ks)
10. Chutová špachtľa
11. Špachtľa PYSZCZEK
12. Laryngologické zrkadlieko
13. Logopedické hryzátko ARK
14. Špachtle na masáž jazyka (3 ks) PROBE, PREEFER, MINI
15. Náhradné diely pre vibrátor s batériou
16. Oronavigátor

Logopedický VIBRÁTOR DnZ-vibe je vibračný senzoricke-oromotorický nástroj, ktorý pomocou vymeniteľných špachtlí poskytuje stimuláciu pier, čeľuste, jazyka, dásien, zubov, líc a podnebia. Úzka, pohodlná rukoväť je vyrobená z textúrovaného elastómeru.



ARK Therapeutic Services, Inc. PO BOX 340, 862 A Highway 1 South LUGOFF, SC29078, Spojené štáty americké



EMERGO EUROPE, Molenstraat 15, 2513 Haag, Holandsko



**UPOZORNENIA** Podrobné upozornenia týkajúce sa použitia vybraných nástrojov nájdete na etiketách.

Odporúča sa pravidelná kontrola dielov: vibrátor je terapeutický nástroj a jeho stav by mal byť kontrolovaný. Nepoužívajte autoklávy ani umývačky riadu na sterilizáciu. Odporúča sa pravidelná kontrola, aby sa vylúčili poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť zranenia počas cvičení. Špachtle neslúžia na hranie, ale sú terapeutické nástroje a ich používanie by malo prebiehať pod stálym dohľadom terapeuta alebo opatrovníka (rodiča). Rukoväť (držadlo) sa nesmie hryzáť. Ak existuje podozrenie na vniknutie vody do vnútra nástroja, rozložte ho na časti, na uterák a nechajte ho úplne vyschnúť. Materiály použité na výrobu špachtlí majú atest FDA (Food and Drug Administration USA), čo znamená, že sú bezpečné, medicínskej kvality a neobsahujú olovo, ťažké kovy, PVC, bisfenol ani latex.

### Používajte individuálne.



Výrobok vyžaduje použitie 1 špeciálnej batérie typu AAAA. Výrobok je kompatibilný s inými špachtľami ARK.

### Výmena batérie

- po odskrutkovaní skrutkovacieho vypínača odstráňte stláčaciu pružinu a batériu. Novú batériu vložte slovom ARK alebo plochou stranou smerom k stláčacej pružine; Závit môžete namazať, napr. jedlým olejom, aby ste predišli jeho poškodeniu a uľahčili zaskrutkovanie špachtlí. Čistenie:

1. Pred prvým a každým ďalším použitím umyte jemným mydlovým roztokom s vodou.
2. Po vyčistení rukoväte odskrutkujte špachtľu. Na vyčistenie špachtle použite jemný mydlový roztok s vodou.
3. Ak sa vnútorné časti dostanú do kontaktu so slinami, tekutinou alebo zvlhnutím, rozložte ich na časti, na uterák a nechajte ich úplne vyschnúť, inak môže rukoväť korodovať, čo môže byť príčinou zničenia nástroja. Nástroj skladajte v poradi: vibračný modul, batéria, stláčacia pružina, vypínač. Kryt vypínača zatvára vibrátor a umožňuje jeho zapínanie a vypínanie
4. Pred výmenou špachtle nástroj vysušte.

### Záruka

Výrobca poskytuje 2-ročnú záruku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia a iné poškodenia spôsobené nesprávnym používaním! Distribútor P.Jtherapeutic poskytuje ZÁRUČNÝ a pozáručný servis.

### Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť zakúpený tovar do 14 dní od dátumu nákupu za podmienky, že tovar nebol použitý, je v originálnom balení a nebol žiadnym spôsobom poškodený. Tovar je potrebné zaslať späť na adresu distribútora v obale, ktorý zabezpečí bezpečnú prepravu. Opravné doklady budú vystavené po splnení vyššie uvedených podmienok a bezodkladne zaslané zákazníkovi. Suma vrátenia bude prevedená na váš bankový účet do 14 dní od prijatia podpísaných opravných dokladov našou spoločnosťou.

### Reklamácie

- v prípade uznania reklamácie (chybný výrobok alebo výrobok, ktorý nezodpovedá objednávke) bude tovar opravený alebo vymenený za bezchybný a opäť doručený zákazníkovi na náklady Predávajúceho do 14 dní od dátumu prijatia reklamácie.
- v prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný Zákazníkovi na jeho náklady na dobierku (vrátenie) nákladov, ktoré z tohto titulu vznikli Predávajúcemu.
- v prípade uznania reklamácie (chybný výrobok alebo výrobok, ktorý nezodpovedá objednávke) bude tovar opravený alebo vymenený za bezchybný a opäť doručený zákazníkovi na náklady Predávajúceho do 14 dní od dátumu prijatia reklamácie.
- v prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný Zákazníkovi na jeho náklady na dobierku (vrátenie) nákladov, ktoré z tohto titulu vznikli Predávajúcemu.

Ikony použité na etiketách produktov súpravy:

Symbol	Označenie
	Pred použitím si prečítajte návod
	Upozornenie
	Batéria AAAA
	Autorizovaný zástupca EÚ
	Označenie zhody CE
	Výrobca
	Dovozca
	ZDRAVOTNICKÁ POMÔCKA



Dovozca: P.Jtherapeutic Piotr Jaworski, Chodkiewicza 5, 43-600 Jaworzno, POLSKO

SÉRIOVÉ ČÍSLO sa nachádza na etikete produktu.



